

EASY BREATH™

EASY BREATH™ è un dispositivo monouso per lo scambio di calore e umidità (HME o naso artificiale), da utilizzare su pazienti tracheostomizzati in respiro spontaneo, dotato di un raccordo per la somministrazione di ossigeno, se necessario.



Come si utilizza:

- + **Prima dell'uso, verificare che la confezione sia integra.** Estrarre quindi il dispositivo e collegarlo saldamente al tubo tracheostomico.
- + Se è necessario un supplemento di ossigeno, collegare il tubo di ossigeno al raccordo laterale del dispositivo.
- + Grazie alla valvola bidirezionale, è possibile eseguire aspirazioni o ispezioni senza rimuovere il dispositivo.
- + **Controllare regolarmente la presenza di secrezioni che potrebbero ridurre l'efficienza del filtro.** In caso di accumulo abbondante, sostituire il dispositivo.
- + Per motivi di sicurezza e igiene: **utilizzare il dispositivo su un solo paziente**, per un massimo di 24 ore, e smaltirlo successivamente secondo le normative vigenti.



CARATTERISTICHE TECNICHE	
VOLUME DEL FILTRO	20 ml
PESO	7,8 gr
VOLUME CORRENTE	Non utilizzare con volumi < 100 ml
SUPERFICIE DI SCAMBIO	500 cm ²
RESISTENZA AL FLUSSO	0,28 cm/H ₂ O – 60 l x min 0,20 cm/H ₂ O – 30 l x min
EFFICIENZA DI UMIDIFICAZIONE	29,6 mg /l – Vc = 500 ml
CONNESSIONI	15 F
DURATA MASSIMA DI UTILIZZO	24h
CONFEZIONE	In sacchetti singoli, in scatole da 100 pezzi
SISTEMA DI UTILIZZO	Dispositivo monouso, per singolo paziente

RIFERIMENTI PER L'ORDINE - EASY BREATH™

CODICI:

- BK008BN (sterile)
- BK008XBN (prodotto in ambiente controllato)



infobpbmedica@biopsybell.it
 BIOPSYBELL S.R.L.Società Unipersonale
 Via Aldo Manuzio 24 41037 Mirandola – MO, Italy
 T. +39 0535 27850
 F. +39 0535 33526
 C.F./P.Iva 02615000367
 Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della società Bpunto3 S.r.l.

